

VOCSN VCマスク Leak Alarm 5分フロー

患者安全 → 漏れ箇所 → 回路条件 → 記録

患者 ID		日付	
担当		場所・場面	<input type="checkbox"/> 病室 <input type="checkbox"/> 在宅 <input type="checkbox"/> 夜間 <input type="checkbox"/> 体位変更後

1 安全確認：最初に応援要請の必要性を決める

<input type="checkbox"/> SpO2低下	<input type="checkbox"/> 呼吸困難	<input type="checkbox"/> 顔色不良	<input type="checkbox"/> 意識変化
<input type="checkbox"/> 換気不良疑い	<input type="checkbox"/> 苦痛が強い	<input type="checkbox"/> アラーム反復	<input type="checkbox"/> 原因不明
判断	該当時は応援要請	記録	時刻・体位・対応・結果

2 初動5分フロー：順番を固定して切り分ける

順	見るところ	実施すること	次の判断
1	患者状態	SpO2・呼吸努力・意識・会話可否	異常時は応援要請
2	マスク周囲	鼻梁・口角・下顎側の漏れ音	位置を戻して再評価
3	接続部	Y字・コネクタを再接続	半挿入・緩みを確認
4	回路条件	屈曲・結露・水溜まり・引っ張り	配管位置を調整
5	回路種別	反復時はPre-Use Testを確認	改善しなければ上位者へ

3 原因別チェック：漏れ箇所と対応結果を残す

確認	よくある所見	初動対応	結果
マスク周囲	鼻梁・口角でシュー音／体位で悪化	位置再調整・左右均等に微調整	<input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 不変
接続部	Y字・コネクタの緩み／半挿入	一度外して再装着・固定確認	<input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 不変
回路条件	屈曲・結露・水溜まり・引っ張り	結露除去・配管位置調整	<input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 不変
回路種別	回路交換後から頻発／試験未実施	種別一致・Pre-Use Test確認	<input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 相談

4 申し送り記録：場面・対応・結果を同じ型で残す

発生時刻	体位・場面	原因候補	実施対応	結果・次回対応
--:--				
--:--				

自由メモ（夜間・体位変更後・発汗時・排痰補助後などの再発条件）
